

# Beskytter skadet hud og forebygger sår hud

## 3M™ Cavilon™ No Sting Barrirefilm

*På blå resept til  
stomi, inkontinens  
og kateter*



**3M™ Cavilon™ Barrirefilm** er en alkoholfri, raskt torkende væske som danner en transparent, vanntett barrirefilm på huden. Den lar huden puste, svir ikke og er ikke nødvendig å fjerne. Barrirefilmen legger et beskyttende lag mellom huden og klebende produkter, og reduserer derfor hudskader som kan oppstå når klebende produkter som tape, bandasjer og stomiposer hyppig skal festes og fjernes på samme hudområde.

Cavilon barrirefilm er også velegnet som beskyttelse mot hudirriterende kroppsvæsker som f.eks. urin, avføring, sårsekret og svette. Cavilon barrirefilm reduserer risikoen for eksem og hudskader i forbindelse med inkontinens. Barrirefilmen er også velegnet til beskyttelse av sårkanter mot oppbløting og kan helt erstatte sinksalve og kremer.

Cavilon barrirefilm fås som skumapplikator på 1 ml og 3 ml og sprayflaske på 28 ml. Sterilt pakket. **På blå resept til inkontinens og stomi.**

**Beskytter huden opptil 3 døgn.**

For mer informasjon se [www.cavilon.no](http://www.cavilon.no)

### Forholdsregler

Skal ikke brukes på infiserte sår, over infiserte hudområder, i åpne, dype sår eller på barn under 1 måned.


La produktet tørke fullstendig før påkledning eller bleieskift.

Ved altfor mange lag kan det føles litt stivt på huden.

Ved bruk av Cavilon på små barn anbefales bruk av skumapplikator.

### Bruksområder

- Kan brukes som beskyttelse under alle former for klebende produkter som tape og bandasjer
- Forebygger sår hud ved inkontinens (blå resept)
- Forebygger sår hud under stomiplaten (blå resept)
- Forebygger oppbløting av sårkanter og området rundt såret
- Kan brukes på skadet hud

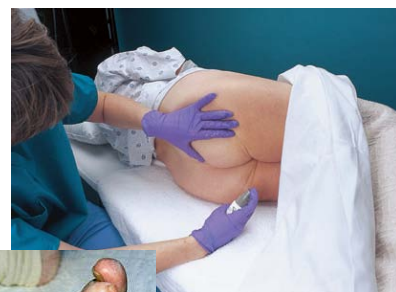

### Lagring og holdbarhet

Oppbevares i romtemperatur. Holdbarhet er angitt med utløpsdato på pakningene.

### Innholdsdeklarasjon

Cavilon består av akrylpolymere i en oppløsning av hexametyldisiloxan (silikonolje).

### Bestillingsinformasjon

3M Produktnr.	NAF/RTV-nr.	Størrelse	Antall/eske
3343N	957498	1 ml skumapplikator	25
3345N	864344	3 ml skumapplikator	25
3346N	901569	28 ml sprayflaske	12
3346NP*	913485	28 ml sprayflaske	1

\*Apotekpakning


# Beskytter skadet hud og forebygger sår hud

## 3M™ Cavilon™ No Sting Barrirefilm



### Brukerveiledning

1. Sørg for at huden er ren og tørr.
2. Ved bruk av skumapplikator, stryk på et jevnt lag på hele området som skal behandles.
3. Ved bruk av sprayflasken, hold sprayflasken ca. 10-15 cm fra huden og spray området med en feiende bevegelse.
4. La barrirefilmen tørke i ca. 30 sekunder.
5. Hvis ikke hele området blir dekket, vent med å ta på et nytt lag med film til det første laget har tørket.
6. Cavilon barrirefilm er ikke nødvendig å fjerne

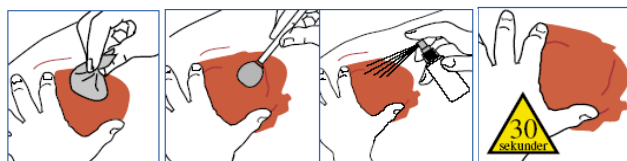

### Hvor ofte skal Cavilon Barrirefilm brukes?

#### Sårkanter

For å unngå oppbløting av huden rundt såret, ta på et nytt lag Cavilon barrirefilm hver 48-72 timer (2-3 dager) på sårkanter og hudområdet rundt. Hyppigere ved behov. Skal ikke brukes i selve såret.



#### Stomi

Unngå sår hud ved ta på et nytt lag Cavilon barrirefilm hver gang du skifter plate og klebende bandasjer/tape. Cavilon barrirefilm kan brukes på skadet hud/småsar som ikke væsker.



#### Inkontinens

Cavilon barrirefilm beskytter effektivt mot kroppsvæsker. Ta på et nytt lag etter 48-72 timer. Bør brukes daglig ved hyppig diaré. Cavilon barrirefilm kan brukes på skadet hud/småsar som ikke væsker.



**Under tape/klebende bandasjer** Pensle eller spray et nytt lag hver gang du fjerner og legger på ny tape/bandasje.

Cavilon barrirefilm kan brukes på skadet hud/småsar som ikke væsker.

