







# BRUKSANVISNING SMEG WD/GW VASKEDEKONTAMINATOR

Slå på maskinen på ved å holde inne  knappen i 2 sekunder.

Dør åpnes ved å trykke på  knapp.

Velg program med knappen   hold inne start knappen  i 2 sekunder, to pip høres og maskinen starter.

BETJENINGS PANEL SYMBOLER			
SYMBOL	FORKLARING	SYMBOL	FORKLARING
	Av/På		Funksjoner
	Start / Stopp		Døråpner
	Gå tilbake		Gå frem

	GW/WD
PR 6	GW - Termisk desinfeksjon 85°C – 5min holdetid. WD - Termisk desinfeksjon 90°C – 1min holdetid.
PR 7	GW - Termisk desinfeksjon 85°C – 10 min holdetid. WD - Termisk desinfeksjon 90°C – 5 min holdetid.
PR 8	GW - Service - drift av slangepumper, inntak av vaskemiddel + tørremiddel.
PR 16	WD - Service - drift av slangepumper, inntak av vaskemiddel + tørremiddel.

***Vi anbefaler at Program 7 benyttes.***

***Program 1-5 har ikke godkjent desinfeksjons fase.***

***Har maskinen 2 doseringsslanger skal den hvite slangen i såpekannen mens den oransje slangen skal i tørremiddel.***

***Sørg for at det ALLTID er middel på kannene.***

