

Kjære QuikRead go bruker.

Du har nå mottatt ditt nye QuikRead go instrument. For å få norsk språk, riktig dato og klokkeslett, samt riktig Hb benevning, må du gjøre noen enkle step for å stille dette inn på instrumentet. Følg oppskriften under og instrumentet er klart-til-bruk på et blunk.

Set-up veiviser


Når QuikRead go instrumentet startes for første gang, vil du bli spurt om å fullføre en Set-up veiviser. I løpet av Set-up veiviseren vil du bli spurt om å velge språk, og å sette dato og tid.

Standardspråk er Engelsk. Språket kan endres i første trinn på Set-up veiviseren.

Star Set-up veiviseren ved å velge **Start** (se **Bilde 10**).

Merk

Set-up veiviseren kan også startes manuelt fra *Innstillinger* -> *Personlige innstillinger* -> *Analyseprosess* -> *Vedlikehold* -> *Grunninnstillinger*.

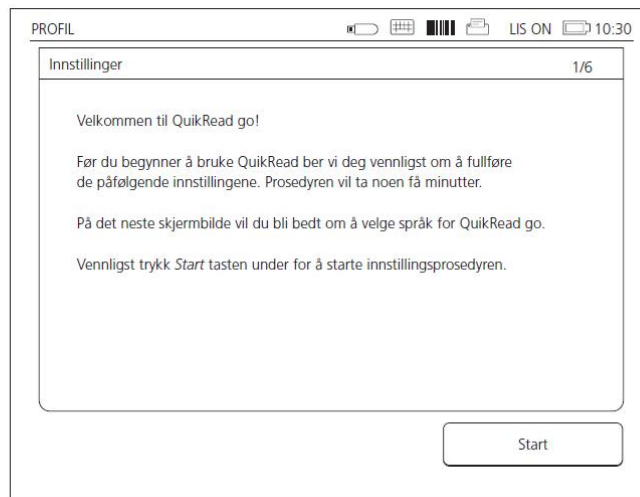

PROFIL LIS ON 10:30

Innstillinger 1/6

Velkommen til QuikRead go!

Før du begynner å bruke QuikRead ber vi deg vennligst om å fullføre de påfølgende innstillingene. Prosedyren vil ta noen få minutter.

På det neste skjermbilde vil du bli bedt om å velge språk for QuikRead go.

Vennligst trykk **Start** tasten under for å starte innstillingsprosedyren.


Start

Språk

Velg språket du ønsker å bruke på instrumentet. Hvis du ikke kan se det ønskede språket på listen, velg *Flere språk* for flere valg. Velg språket ved å berøre korresponderende tast.

Du vil så bli spurt om å bekrefte ditt språkvalg. Du vil se spørsmålet om å bekrefte valget både på Engelsk og det valgte språket. Hvis det valgte språket er riktig velg *Ja*, hvis ikke, velg *Nei*.

Det valgte språket kan endres når som helst senere.

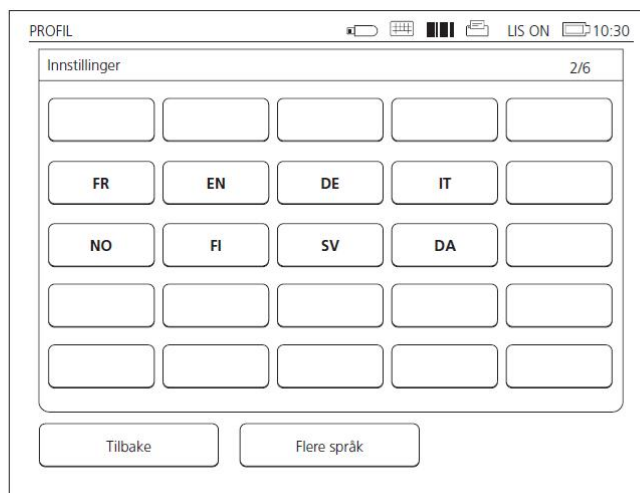

PROFIL LIS ON 10:30

Innstillinger 2/6

FR	EN	DE	IT	
NO	FI	SV	DA	

Tilbake **Flere språk**

Dato og tid

Det andre trinnet i Set-up veiviseren er å justere dato og tid. For å gjøre dette, følg instruksjonene nedenfor:

1. Velg *Endre* på *Tid* raden.
2. Juster tiden med pil- tastene.
3. Velg mellom 12-timers og 24-timers klokke.
4. Godta med *OK*.
5. Trykk *Endre* på *Dato* raden.
6. Juster datoen med pil-tastene.
7. Velg format for dato.
8. Godta med *OK* og bekreft ved å velge *OK* på neste skjerm bilde.
9. Velg *OK* for å fortsette.
10. Velg *Neste*.

Skjermbelysning

Det tredje trinnet i Set-up veiviseren er å justere skjermbelysningen. For å gjøre det, følg instruksjonen nedenfor:

1. Juster skjermbelysningen med pil-tastene.
2. Godta ved å velge *Neste*.



PROFIL LIS ON 10:30

Innstillinger VEDLIKEHOLD: DATO & TID 2/6

Tid: 10:32 am Endre

Dato: 2010-04-30 Endre

i Endre tid og dato. Instrumentet vil ikke automatisk omstilles sommer/ vintertid, men må stilles manuelt.

Tilbake Neste

Lydvolum

Det fjerde trinnet i Set-up veiviseren er å justere lydvolümet:

1. Juster volumet for tastaturtonen med pil-tastene.
2. Lydvolumet kan testes ved å bruke *Test* tasten.
3. Juster volumet for Alarmtonen med pil-tastene.
4. Lydvolumet kan bli testet ved å bruke *Test* tasten.
5. Godta ved å velge *Neste*.

Fullføre Set-up veiviseren


Du har nå fullført Set-up veiviseren. Du kan nå begynne å bruke instrumentet, eller fortsette med ytterligere innstillinger på *Innstillinger* -> *Vedlikehold*.

Brukergrensesnitt

QuikRead go instrumentet brukes via et grafisk brukergrensesnitt. I dette kapittelet er hovedprinsippet for brukergrensesnittet forklart.

Hovedmeny

Alle mulighetene angående brukergrensesnittet kan nås via hovedmenyen (se **Bilde 13**).

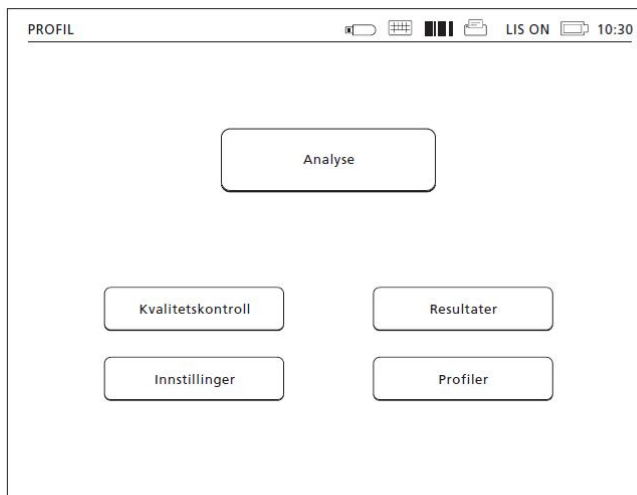

PROFIL LIS ON 10:30

Analyse

Kvalitetskontroll Resultater

Innstillinger Profiler

For å sette riktig Hb benevning gjør følgende:

Når du får teksten «grunninnstillinger for QuikRead er utført. Du kan nå velge å gjøre flere avanserte innstillinger eller begynne å bruke QuikRead».

Du får to valg: Hovedmeny og Avansert set-up. Velg Avansert set-up + neste

Velg testparametre!

Du har nå kommet til Avansert set-up, velg *Abc* for admin passord.

Skriv: QRG0SET + ok

Velg *crp+hb* for å sette inn riktig Hb benevning



Set-up veiviser for QuikRead go instrumentet

Velg g/dl – gjør det samme med wrgrp+hb + ok + neste + neste + hovedmeny
Instrumentet er nå klart til bruk!

Hvis det oppstår problemer eller det er behov for ytterligere informasjon, vennligst ring Britt på telefon 975 38 860, eller send en e-post til:

britt.fredriksen@oriondiagnostica.com

Lykke til!

Oslo 15.09.2016
Orion Diagnostica
Britt S Fredriksen