

# Montering av Serres sugepose i ytterbeholder



- Strekk ut posen og sett den ned i ytterbeholderen.
- Slå på suget, trykk ned midt på lokket og se at posen bretter seg ut.
- Behold et fast trykk på lokket, og tett åpningen der sugeslangen skal tilkobles.
- Se at posen og lokket suges fast i ytterbeholderen.
- Serres sugesystem er deretter klart til bruk.



## Etter bruk



- Skru av vakuumkilden.
- Koble fra sugeslangen på pasientsiden.
- Lukk inngangen med proppen. Ved seriekobling, propp posene i rekkefølge. Bruk det sterke løftehåndtaket og løft posen ut av ytterbeholderen.
- Avfallshåndteringen ifølge sykehusets rutiner.