



DAX Overflatedesinfeksjon 75

DAX Overflatedesinfeksjon 75 er beregnet for desinfeksjon av synlig rene flater f.eks. benker, bord og undersøkelsesbenker. DAX Overflatedesinfeksjon 75 er effektiv mot bakterier, sopp og ulike typer virus som HIV, Hepatitt B og C.

Fordeler med DAX Overflatedesinfeksjon 75

- 75 volumprosent alkoholstyrke, med etanol som hovedkomponent
- Fungerer raskt og effektivt uten å etterlate spor på den behandlede overflaten
- Har dokumentert effekt på bakterier, sopp og flere ulike virus som f.eks. HIV, murine norovirus og adenovirus

Slik gjør du/Dosering:

- Fukt en klut med uttynnet bruksløsning, eller spray direkte på overflaten
- Bearbeid flaten gjentatte ganger
- Om overflaten er skitten, må den rengjøres først med vanlig rengjøringsmiddel
- La overflaten være lett fuktig når virketiden er over og la lufttørke
- Bruk så mye overflatedesinfeksjonsmiddel som er nødvendig for at overflaten er fuktig under hele kontakttiden (se side 2 for kontakttid)



Produktnamn	Artikelnummer	EAN	Antal st/krt
DAX Ytdesinfeksjon 75, 1000 ml	493-12	7331964004937	12

DAX Overflatedesinfeksjon 75

Mikrobiologisk informasjon

Bactericidal effekt

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa 30 sek
Staphylococcus aureus 30 sek
Enterococcus hirae 30 sek
Escherichia coli 30 sek

Yeasticidal effekt

EN 13624 Candida albicans 30 sek

Fungicidal effekt

EN 13624 A. Brasiliensis 15 min

Virucidal effekt

EN 14476 Adenovirus 30 sek
Murine Norovirus 30 sek
Limited Virucidal Efficacy

Formuleringstype

- Væske

Forpakkingsmateriale

- HDPE

Holdbarhet:

Inntil utløpsdato (trykt på pakken)

Produktnamn	Artikelnummer	EAN	Antal st/krt
DAX Ytdesinfektion 75, 1000 ml	493-12	7331964004937	12