


# Mepilex® Border

## DEN EFFEKTIVE ABSORBERENDE ALT-I-ETT SKUMBANDASJEN

- Effektiv væskehåndtering
- Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift <sup>1</sup>
- Sikker fiksering, men likevel atraumatisk ved fjerning
- Dusjtett

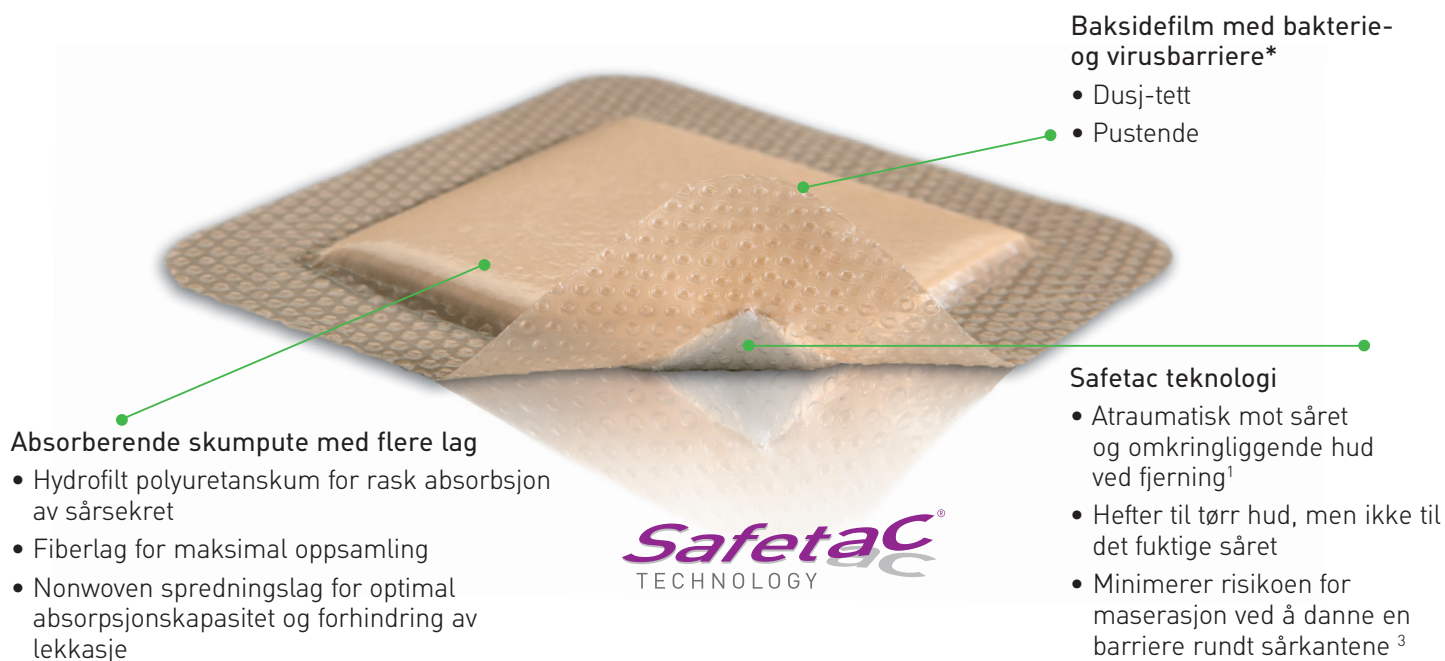



### Safetac® teknologi

#### Safetac® teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.


Safetac er en patentert hefteteknologi som minimerer skade på såret og smerte for pasienten. Safetac teknologi finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex® - familien, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

For mer informasjon [www.safetac.com](http://www.safetac.com)


\*Mikroorganismer større enn 25nm.

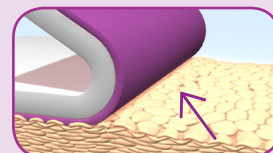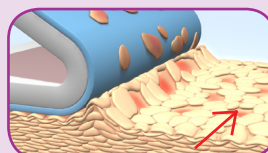

## Hvordan bruke Mepilex Border

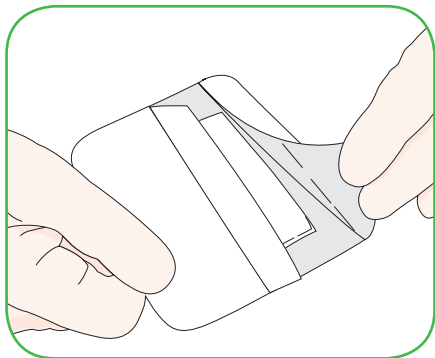

Rens sårområdet.  
Fjern releasepapiret.

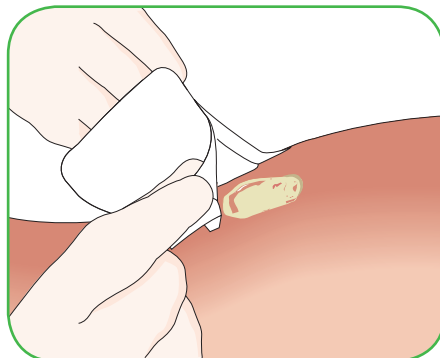


Appliser den heftende siden mot såret.  
Ikke strekk.

## Fordeler med Mepilex Border

- Selvheftende
- Ikke behov for fiksering
- Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift
- Kan ligge på såret i opptil syv dager avhengig av sårets tilstand
- Dusjtett
- Kan løftes og justeres uten å miste den heftende egenskapen
- Komfortabel i bruk
- Kan brukes under kompresjon
- Liten risiko for hudirritasjon og allergi

## Slik fungerer Mepilex Border

Mepilex Border er en alt-i-ett skumbandasje som absorberer og holder på sårvesken og et fuktig sårmiljø. Safetac sorsegler sårkantene og hindrer at sårveske lekker ut på omkringliggende hud. Dermed forhindres maserasjon. Safetac sikrer at bandasjen kan skiftes uten å skade den omkringliggende huden uten å utsette pasienten for ytterligere smerte.

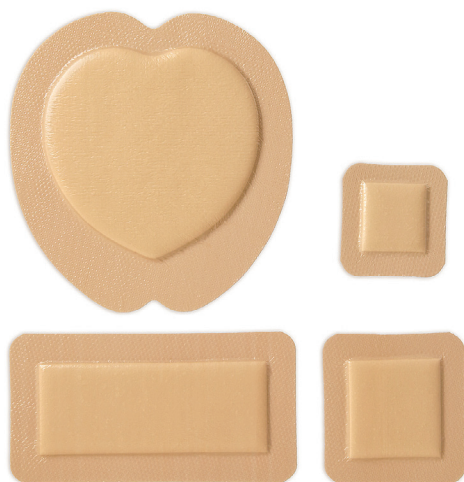

## Bruksområder

Mepilex Border egner seg til en rekke væskende sår som for eksempel:

- Trykksår
- Legg- og fotsår
- Traumatiske sår, blant annet hudflenger og kirurgiske sår

## NB!

Dersom det er kliniske tegn til infeksjon, kan bruken fortsette dersom man setter i verk infeksjonsbehandling.



## Mepilex Border sortiment (Sterilt forpakket)

	Art. nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
Mepilex Border	295200	7,5 x 7,5	5	70
	295300	10 x 10	5	50
	295400	15 x 15	5	50
	295600	15 x 20	5	45
Kirurgiskt sortiment	295800	10 x 20	5	35
	295850	10 x 25	5	35
	295900	10 x 30	5	25
Mepilex Border Sacrum	282000	18 x 18	5	40
	282400	23 x 23	5	25

Referanser: 1. Data on file

2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. Principles of best practice:

Minimising pain at wound dressing-related procedures. A consensus document. London: MEP Ltd, 2004.

3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100.

Mölnlycke Health Care  
Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo  
Telefon: 22 70 63 70  
www.molnlycke.no

The Mölnlycke Health Care name and logo and Mepilex Border are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

