

# Mepilex® Lite

## ABSORBERENDE MYK SILIKONBANDASJE

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning<sup>1,2</sup>
- Former seg etter kroppen

### Safetac® lag (myk silikon)

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning<sup>1,2</sup>
- Hefter ikke til en fuktig såroverflate men skånsomt til tørr omkringliggende hud
- Minimerer risikoen for maserasjon<sup>3</sup>

### Tynn skumpute

- Absorberer eksudat
- Former seg etter kroppen
- Holder formen



### Film bakside

- Pustende
- Vanntett


## Safetac® teknologi

\*Mepilex behøver ikke klippes til sårstørrelsen ved bruk av kompresjon.

### Safetac® teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.™

Safetac er en patentert hefteteknologi som minimerer skade på såret og smerte for pasienten. Safetac teknologi finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex®-familien, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

For mer informasjon se [www.safetac.com](http://www.safetac.com)

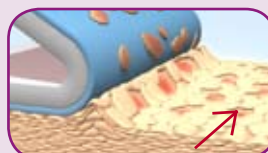


Hudstripping ved bruk av tradisjonelle heftemidler



Ingen hudstripping ved bruk av Safetac


## Hvordan bruke Mepilex Lite

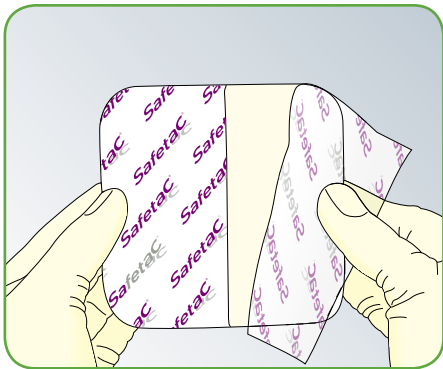

Rens sårområdet i henhold til normale prosedyrer. Tørk omkringliggende hud ordentlig. Benytt releasefilmene som hjelp under applisering.



Appliser den heftende siden mot såret. Ikke strekk. Mepilex Lite bør overlape omkringliggende hud med minst 2 cm. Mepilex Lite kan klippes til etter behov.

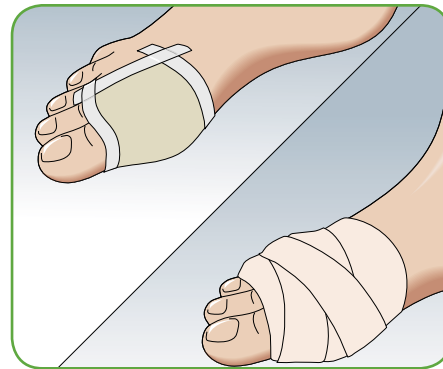

Fiksér Mepilex Lite med annen fiksering.

## Slik fungerer Mepilex Lite

Mepilex Lite er en meget komfortabel bandasje som absorberer eksudat og opprettholder et fuktig sårmiljø. Bandasjen danner en barriere rundt sårkantene og hindrer lekkasje på omkringliggende hud, og minimerer derfor risikoen for maserasjon. Safetac laget sikrer atraumatiske bandasjeskift. Mepilex Lite kan klippes til for å passe ulike sårtyper og kroppsdelene.

## Fordeler med Mepilex Lite

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud
- Minimerer smerte hos pasienten ved fjerning
- Minimerer risikoen for maserasjon
- Former seg etter kroppen
- Tynn og komfortabel
- Enkel å håndtere
- Opprettholder et fuktig sårmiljø
- Kan klippes til riktig fasong
- Kan ligge på ved strålebehandling
  - Påvirker ikke stråledosen til tumor
  - Øker ikke huddosen

## Bruksområder

Mepilex Lite egner seg til en rekke ikke-til lite væskende sår som for eksempel legg- og fotsår, trykksår, delhud brannskader, stråle-reaksjoner og Epidermolysis Bullosa. Mepilex Lite kan også brukes som beskyttelse på skjør- og utsatt hud. Mepilex Lite kan brukes under kompresjon. Den kan også brukes i kombinasjon med geler.



## NB!

Dersom det er kliniske tegn til infeksjon, kan bruken fortsette dersom man setter i verk infeksjonsbehandling.

## Hva er Safetac teknologi?

Safetac er en patentert teknologi for skånsom men sikker fiksering med myk silikon. Safetac minimerer skade og smerte på såret og omkringliggende hud ved bandasjeskift.<sup>1-3</sup>



### MEPILEX LITE Sortiment

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
284000	6 x 8,5	5	70
284100	10 x 10	5	50
284300	15 x 15	5	50
284500	20 x 50	2	12

Mepilex Lite er pakket i sterile enhetspakninger